



**DUŠO-TUALETO KĚDĚ**

**REF:0803390**

**CE**

*PERŽIŮRA 06/2023*

Dušo-tualetu kėdė yra naudojama kaip tualetu pagalbiniė priemonė riboto judrumo žmonėms ir yra skirta naudoti tik patalpose. Ji skirtas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, pacientams, pagyvenusiems žmonėms bei judėjimo sunkumų turintiems žmonėms.

**Tinka naudoti duše.**



**SPECIFIKACIJA**

<b>RĖMAS</b>	<b>Aliuminis, PP (POLIPROPILENAS), REGULIUOJAMAS AUKŠTIS 6 LYGMENYS</b>
<b>SPALVA</b>	<b>PILKA</b>
<b>SĖDYNĖS MEDŽIAGA</b>	<b>PE ir PVC</b>
<b>NUGARĖS MEDŽIAGA</b>	<b>PE ir PVC</b>
<b>SU NUIMAMOMIS RANKŲ ATRAMOMIS, ATLOŠU IR KOJELĖMIS</b>	

46 cm	43 cm	54 cm	42-54,7 cm	36 cm	5,1 kg	120 kg

## SIMBOLIAI

Žr. A PRIEDĄ

## SURINKIMAS

Žr. B PRIEDĄ

## PRIEŽIŪRA

Periodinės dušo-tualetu kėdės patikros tikslas – įsitikinti, kad ji tinkamai veikia kaip pagalbinė priemonė ir turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

- Patikrinkite dušo-tualetu kėdę, ar nėra lūžių, įtrūkimų ar prabėgimų.
- Patikrinkite, ar plastikinėse dalyse nėra laisvumo, įskilimų ar įtrūkimų.
- Patikrinkite dušo-tualetu kėdės stabilumą.

Remonto atveju naudokite tik autentiškas atsargines dalis.

## VALYMAS

Išvalykite dušo-tualetu kėdę iš karto po naudojimo. Iš pradžių nuplaukite šiltu vandeniu. Tada naudokite minkštą šluostę, impregnuotą švelniu plovikliu arba antiseptiniu tirpalu. Nuvalykite švaria, minkšta šluoste.

**ATSARGIAI:** Nenaudokite rūgščių ar šarminių tirpalų.

Rekomenduojame nuvalyti rėmą ir sėdynę švelniu plovikliu arba antiseptiniu tirpalu. Savo patogumui, įpylę tirpalo, galite naudoti purškimo buteliuką. Išpurškite produktą ir nuvalykite kempine. Nusausinkite paviršius švaria šluoste.

## SVARBU

- Reguluodami aukštį įsitikinkite, kad 4 kojų aukštis yra vienodas, o kaiščiai tvirtai pritvirtinti.
- Turi būti laikoma sausoje, vėdinamoje patalpoje, kurioje nėra korozinių medžiagų.
- Transportuojant su ja reikia elgtis atsargiai.

Prieš naudodami dušo-tualetu kėdę, įsitikinkite:

- Šioje pozicijoje ji yra visiškai ir apsaugota.
- Sėdynė yra tinkamai pritvirtinta ir pritvirtinta šioje padėtyje.
- Dušo-tualetu kėdė yra tinkamai įstatyta į atitinkamą angą.
- Ant rėmo nėra įskilimų ar įtrūkimų.
- Nerūkykite ir nenaudokite liepsnos šalia gaminio.
- Saugokite gaminį nuo įbrėžimų, įpjovimų ir dūrių.
- Reguluodami aukštį įsitikinkite, kad 4 kojų aukštis yra vienodas, o kaiščiai tvirtai pritvirtinti.
- Turi būti laikoma sausoje, vėdinamoje patalpoje, kurioje nėra korozinių medžiagų.
- Transportuojant su kėdute reikia elgtis atsargiai.

## KITOS INSTRUKCIJOS

- Sėdėdami ar pakeldami rankenas turite jas nuspausti žemyn, kad dušo-tualetu kėdė nejudėtų ir neslystų.
- Dušo-tualetu kėdės negalima naudoti ant slidžių paviršių.
- Kai ketinate keltis, turite laikytis abiem rankenomis. Remiantis tik viena ranka (be palydovo) galite susižaloti pats, arba sugadinti gaminį.
- Reguliariai valykite dušo-tualetu kėdę.
- Nepalikite dušo-tualetu kėdės šlapios.

- Neleiskite vaikų prie dušo-tualetų kėdės be priežiūros.



## **ĮSPĖJIMAS**

Iškylus problemai, nenaudokite dušo-tualetų kėdės, kol problema nebus išspręsta.

- Nenaudokite gaminio šiame vadove nenurodytam tikslui.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias pasekmes, kilusias dėl netinkamo šio gaminio naudojimo.
- Gamintojas pasilieka teisę keisti šiame dokumente pateiktą informaciją be įspėjimo.
- Neleiskite vaikams žaisti ant dušo-tualetų kėdės.
- Nemėginkite kelti dušo-tualetų kėdės už nuimamų dalių.
- Supakuotą dušo-tualetų kėdę laikykite toliau nuo šilumos šaltinių.
- Atsisėsti į dušo-tualetų kėdę ir iš jos išlipti galima savarankiškai, jei turite pakankamai mobilumo ir viršutinės kūno dalies jėgos.



## **APLINKOSAUGA**

Jei vieną dieną pastebėsite, kad jūsų gaminį reikia pakeisti arba jei jis jums nebenaudingas, pagalvokite apie aplinkos apsaugą:

- 1) Neišmeskite gaminio kartu su kitomis viešosiomis atliekomis (tai taip pat reiškia parodytas perdirbimo ženklas).
- 2) Susisiekite su savo valdžios institucijomis ir jie nurodys perdirbimo centrus, į kuriuos reikia atiduoti jūsų prietaisus.
- 3) Tinkamas gaminio išmetimas padeda apsaugoti aplinką ir perdirbti gaminio komponentus.

## **PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ**

Apie bet kokį rimtą incidentą, įvykusį naudojant prietaisą, reikia pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

## GARANTIJA

Jūsų dušo-tualetu keiči suteikiama 2 metų garantija nuo pirkimo datos.

Garantija apima gamyklinius defektus ir NEAPIMA defektų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo, prastos priežiūros, modifikavimo, per didelio naudojimo arba nesilaikant gaminio naudojimo instrukcijų. Jis taip pat NEAPIMA naudojimo metu susidėvėjusių dalių. Garantija taip pat netaikoma žalai ar defektams, atsiradusiems dėl: stichinių nelaimių, neteisėtos priežiūros ar remonto, elektros energijos tiekimo problemų (jei yra), transporto įmonių. Garantinių prekių siuntimo išlaidas apmoka klientas arba pardavėjas.

## GARANTIJOS FORMA

PIRKĖJO INFORMACIJA			
PILNAS VARDAS:			
PIRKIMO DATA:		TELEFONAS:	
PARDAVĖJO INFORMACIJA			
PILNAS VARDAS		ADRESAS	
TELEFONAS		<b>VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS</b>	

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

Tik mes esame atsakingi už patvirtinimą, kad šiame pareiškime minimi medicinos prietaisai yra mažos rizikos klasės (I klasės) ir atitinka Europos reglamento Nr. 745/2017 reikalavimus ir, jei reikia, nurodytus standartus bei teisės aktus.





















MOBIAK S.A  
KAGIANA AKROTIRIOY, XANIA - KPTHH  
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE  
| WEB: [www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)




## A PRIEDAS. SIMBOLIAI

Etiketėje, ant dėžės ir (arba) naudojimo instrukcijoje pateikti simbolių aprašymai

	Medicinos priemonė		CE ženklas
	Gamintojas		Pagaminimo data
	Priemonės kodas		Perskaitykite naudojimo instrukcijas
	Serijos numeris		Nenaudokite jeigu prekės pakuotė yra pažeista
	Partijos numeris		Laikyti stačiai
	Unikalus priemonės identifikatorius		Laikyti atokiai nuo saulės spindulių
	Laikyti sausoje vietoje		Krovimo aukštis
	Elkitės atsargiai		Dūžtantis
	Skirta naudoti tik patalpose		Pagal elektronikos atliekų direktyvą yra elektronikos atlieka

## B PRIEDAS. SURINKIMAS

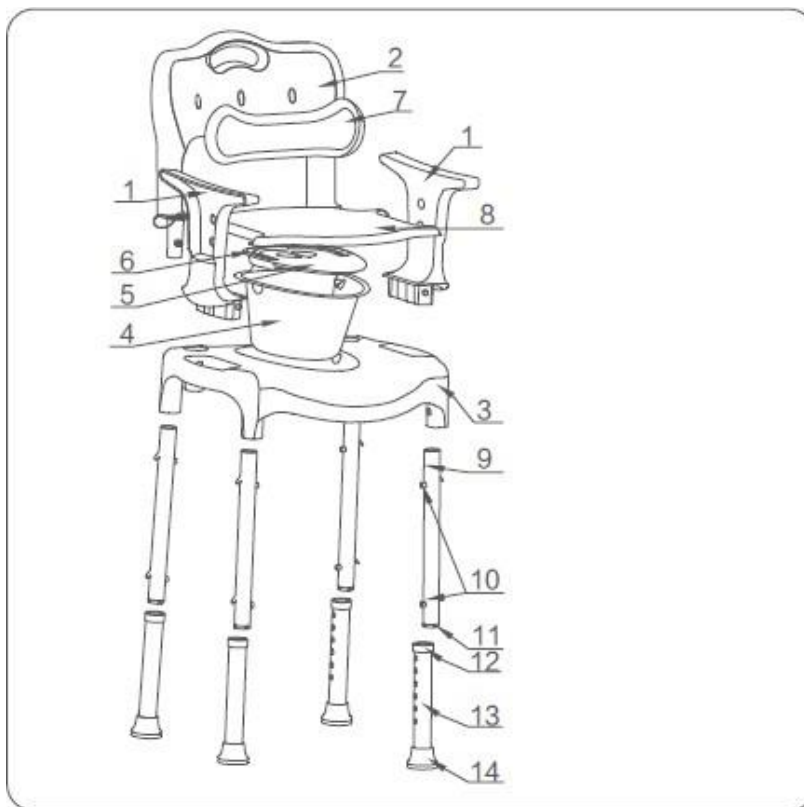

1. PORANKIS
2. ATLOŠAS
3. DUŠO TUALETO KĖDĖS SĖDYNĖ
4. DUŠO TUALETO KĖDĖ
5. DUŠO TUALETO KĖDĖS DANGTIS
6. DUŠO TUALETO KĖDĖS RANKENA
7. ATRAMOS PAMINKŠTINIMAS
8. SĖDYNĖS PAMINKŠTINIMAS
9. KOJOS VAMZDELIS
10. TVIRTINIMO KAIŠTIS
11. VIDINIS VAMZDŽIO KAIŠTUKAS
12. VAMDELIO DANGTELIS
13. REGULIUOJAMO AUKŠČIO VAMZDELIS
14. GUMINIS ANTGALIS

- I. Pastaba: Įkiškite 4 kėdės kojų vamzdelius (9) į sėdynės (3) skylės, kol išgirsite būdingą fiksavimo garsą.
- II. Įkiškite porankį (1) ir atlošą (2) į sėdynės (3) tvirtinimo angas tuo pačiu būdu, kol išgirsite būdingą fiksavimo garsą.



- III. Dušo-tualetu dalis (4), (5), (6) įstatykite į vidurinę sėdynės (3) skylę, tada įdėkite sėdynės paminkštinimą (8).
- IV. Pritvirtinkite atlošo pagalvėlę (7) prie 3 mažų ovalių skylučių atloše (2). Dabar montavimas baigtas ir galima įprastai naudoti.
- V. Norėdami naudoti kėdę pagal tualetu paskirtį, nuimkite sėdynės pagalvėlę (8) ir dangtį (5.) o po naudojimo vėl uždenkite.

#### **Aukščio reguliavimas:**

*Viena ranka paspauskite išsikišusį padėties nustatymo kaištį (10), o kita ranka laikykite reguliuojamą vamzdelį (13). Perkelkite jį į tinkamą padėtį (6 lygiai) ir įsitikinkite, kad 4 kojų aukštis yra toks pat, o kaiščiai tvirtai pritvirtinti*

#### **Porankio ir atlošo nuėmimas:**

2 žmonės turi nuimti dušo-tualetu kėdės porankį ir atlošą/ Vienas žmogus nustumia porankį ( 1) ir išsikišusius kaiščius atlošo apačioje (2), o kitas asmuo laiko ir šiek tiek pakelia porankį (1) ir atlošą (2), kad juos nuimtų.